


扶手

型號 T112型・T113型・T114型

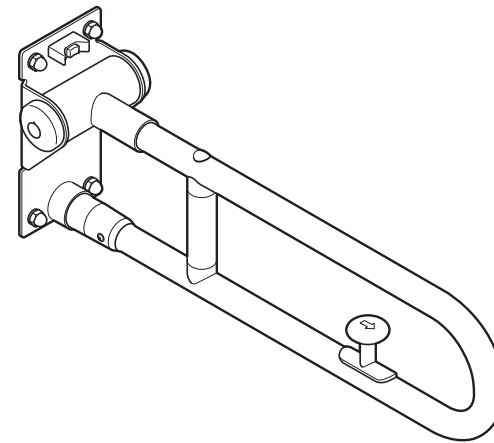

- ◆感謝您選購TOTO扶手。
請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆請務必確認保證書(另附)內是否已記入安裝店名、安裝日等事項。
- ◆本說明書，請務必妥善保存。必要時請詳細閱讀。

前言

安全注意事項	1 ~ 3
使用注意事項	4
各部位名稱	5
關於抗菌	6

使用方法

使用方法	7 ~ 8
------------	-------

清潔保養

日常清潔保養	9
定期檢查	10


疑難排解

疑似故障時	11
售後服務	12





安全注意事項 (為了安全起見 請務必遵守)

使用前，請務必詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確的進行施工。




- 閱畢之後，請務必收存於使用者可以隨時取閱的地方。
- 本說明書所列出的各種警告標示，是為方便您能安全、正確安裝此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害、或因使用不當而導致財產的損失。各標示及其含意如下所示。








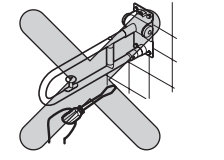

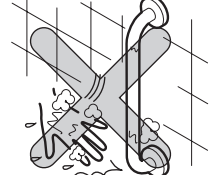
標示	意義
 警告	若無視此注意內容，錯誤的使用，可能導致人員的死亡或重傷。

■ 以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	 為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止拆解」。
	 為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

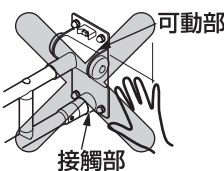依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。


 警告	
 禁止	<p>請勿使用於扶手以外的用途 (如垂吊、攀爬、搖晃、踢踩吊曬衣物或抹布等)</p> <p>可能因手滑、扶手脫落，導致人員跌倒、受傷。</p> 
	<p>操作活動扶手時，請勿將手放置在活動部及握把接觸部</p> <p>手可能被可動部及握把接觸部夾到導致受傷。</p> 
	<p>活動扶手(上昇活動扶手)上掀使用時，請勿做為扶手功能使用</p> <p>可能因握把在可動的狀態下，導致人員跌倒、受傷。</p> 

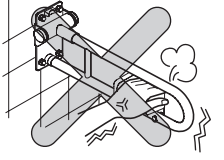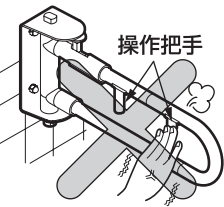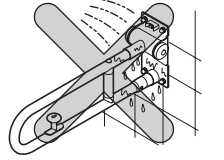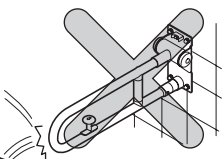 警告	
 禁止	<p>請勿握持握把以外的部分(衛生紙架等)，或施與重力</p> <p>可能因衛生紙架掉落導致人員受傷。</p> 
	<p>請勿對左右活動扶手、上昇活動扶手(鎖定式)的操作把手強押、拉扯及過度施力</p> <p>可能因操作把手破損、損壞導致人員受傷。</p> 
	<p>活動扶手請勿接觸到水分或高濕氣</p> <p>可能損壞扶手機能，導致人員受傷。</p> 
	<p>請勿碰撞到硬物</p> <p>可能因扶手破損、脫落，導致人員跌倒、受傷。</p> 
 禁止拆解	<p>禁止拆解・改造(安裝衛生紙架或遙控器等)</p> <p>可能因扶手的破損、脫落，導致人員受傷。</p> 
	<p> 務必執行</p> <p>手濕或手沾上肥皂使用扶手時，或扶手被潑濕或沾上肥皂時，請小心使用</p> <p>可能因手滑導致重大事故。</p> 

使用注意事項 (請務必遵守以下事項)

請勿靠近香菸等火源

可能會導致扶手(樹脂部分或塗裝部分)燒焦、溶解。

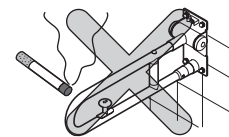

警告


需要看護人員的使用者，為避免發生意外，請看護人員注意使用

可能因使用者無法緊握扶手、沒有抓好，導致重大事故。




請注意，請勿將頭、手及手腕等放入扶手及牆壁之間，或是扶手與其他器具之間。

可能因身體被夾住導致重大事故。

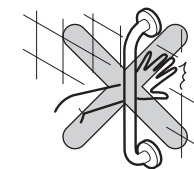


操作活動扶手時，請確認可活動範圍內沒有任何障礙物

可能因身體碰撞到扶手、跌倒等，導致人員受傷。

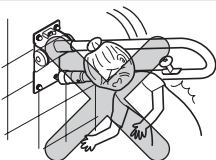


請定期(至少1次/月)確認沒有破損、鬆脫等異常，若有異常情形時，請停止使用，並儘快委託維修

可能因扶手破損或脫落，導致人員受傷。

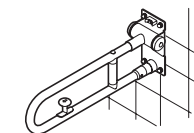


操作活動扶手時，請慢慢操作

可能因身體碰撞到扶手、跌倒等，導致人員受傷。

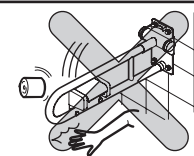


使用方法標籤請黏貼於使用者易見場所

可能因錯誤使用等導致人員跌倒、受傷。

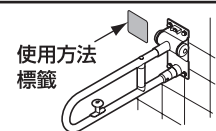

上昇活動扶手(上鎖式)，水平狀態下請務必確認已鎖定後再使用

可能因為沒有鎖定，導致人員跌倒、受傷。

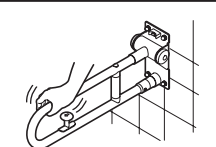


務必執行


各部位名稱

●固定式扶手


I 類型

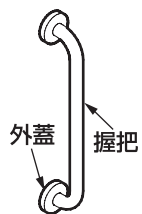


R/L兼用 L類型

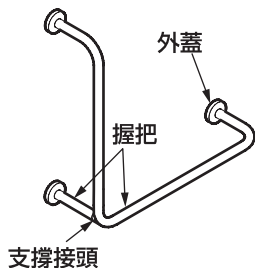

小便器類型

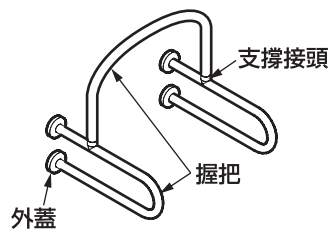

和風馬桶類型

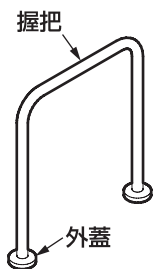


人工大理石
檯面類型




●活動扶手


上昇活動扶手
(鎖定式)

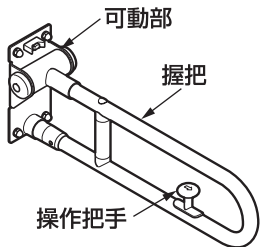

上昇活動扶手

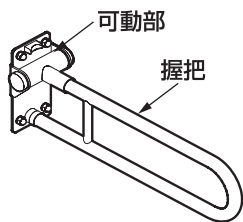

左右活動扶手

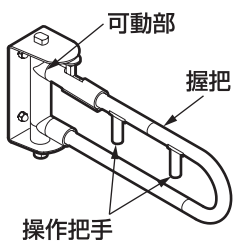

※活動扶手的使用方法請參照「使用方法」(P.7~8)。
 ※依品番不同，圖示與實際產品可能有差異。

關於抗菌

●T112型、T114型的場合

抗菌效果	可抑制產品表面上細菌的繁殖。在JNLA認定試驗所實施該JIS Z 2801抗菌性試驗方法的試驗，其結果符合JIS Z 2801規定的抗菌效果。該試驗效果並不說明還具有防止感染、防污、防霉、防臭、防滑等輔助性效果。
抗菌加工部位	握把部 (T114型僅樹脂覆蓋部)
抗菌劑種類	無機系
抗菌性能持續性	符合(社)日本建材、住宅設備產業協會的標準
安全性	符合(社)日本建材、住宅設備產業協會的標準
禁止事項	請勿使用酸性、鹼性清潔劑。
使用注意事項	為了能更有效的發揮抗菌功能，應常保產品表面清潔。

※若細菌未直接與抗菌加工後的產品表面接觸，抗菌能力則無法發揮作用。

使用方法

※活動扶手有可將握把上掀的上昇活動扶手及橫向轉動的左右活動扶手。


警告




禁止

請勿對左右活動扶手、上昇活動扶手(鎖定式)的操作把手強押、拉扯及過度施力

可能因操作把手破損、損壞導致受傷。

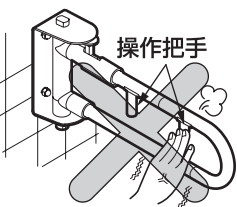

●上昇活動扶手(鎖定式)

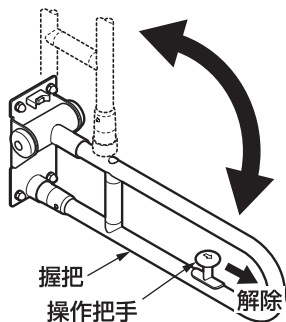


1. 握把上掀。

將操作把手拉向身邊，解除鎖定狀態，拉著操作把手的狀態下，將握把慢慢向上拿起。

2. 握把放下。

將把手確實放下至握把呈水平狀態，握把可固定。握把只在水平狀態下可固定。

●上昇活動扶手

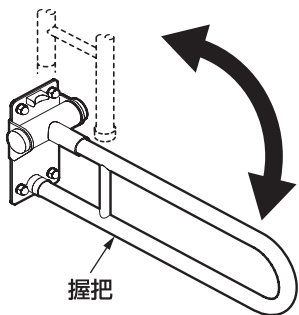


1. 握把上掀。

將握把慢慢向上拿起。

2. 握把放下。

將把手確實放下至握把呈水平狀態。握把無法固定。

●左右活動扶手的場合

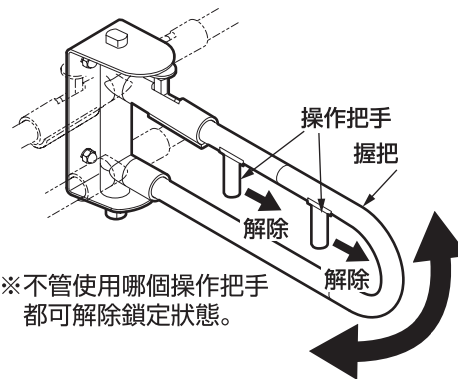

※不管使用哪個操作把手都可解除鎖定狀態。

1. 移動握把。

將操作把手拉向身邊，解除鎖定狀態，拉著操作把手的狀態下，將握把慢慢移至欲使用的位置。

2. 固定握把。

將握把移至欲使用的位置，鬆開操作把手，操作把手回至原位後即可固定。握把每15°可進行固定。


日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

使用布料的清潔保養

●一般清潔保養方法

請以沾水(或溫水)後擰乾的柔軟布料，擦去髒污。

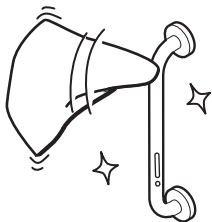


●嚴重髒污時的清潔保養方法

請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，再以沾水擰乾軟布，將清潔劑擦拭乾淨後，擦乾。

●T114型的場合

T114型的樹脂覆蓋部位與不鏽鋼部位的連接部位可能會堆積污垢，此時，請使用天然的中性清潔劑滲入連接部位深處，去除污垢。

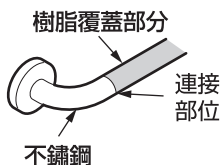


請求

請勿使用會損傷扶手表面的物品。



- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
可能導致扶手表面變色(含生鏽)、損傷。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等
可能損傷扶手表面。
- 軟膏類藥物、生髮劑、染髮劑、卸妝油、
美髮造型產品等
- 稀釋劑、揮發劑、油類等有機溶劑
可能導致扶手表面變色，橡膠或樹脂零件破損。

·若酸性·鹼性清潔劑、含氯漂白劑、有機溶劑沾到扶手時，請立即使用擰乾水分的濕軟布擦拭乾淨。

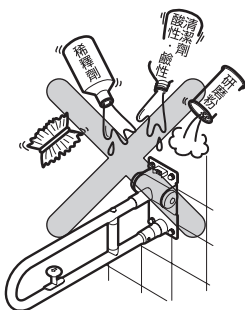

定期檢查 (至少1回/月進行檢查)

因商品長期使用所伴隨的劣化(數年劣化)，可能出現安全上的疑慮。為了防止因數年劣化產生的重大事故，並可讓產品更耐久、安全、舒適的使用，請每年進行1次以下定期檢查。
若發生不良情形時，請停止使用，並洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250。

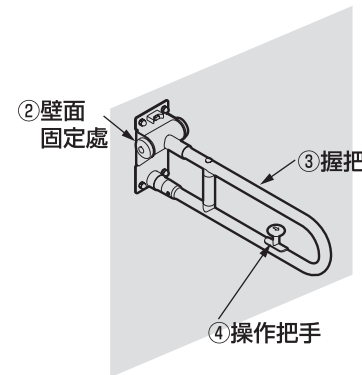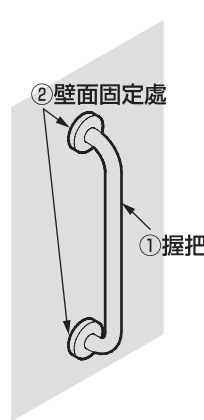

編號	檢查部位等 (參照圖示)	惡化確認項目	有無徵兆			隨著經年累月的惡化可預測的具體情形 (危害情報)
			有	無	—	
①	握把	變形・裂痕	有	無	—	因扶手破損、跌倒導致的傷害
		搖晃不穩	有	無	—	
②	壁面固定處	螺絲鬆動脫落(限活動扶手)	有	無	—	扶手由壁面鬆脫、跌倒導致的傷害 身體碰撞到扶手，跌倒導致的傷害
		搖晃不穩	有	無	—	
		出現裂痕	有	無	—	
—	壁面	搖晃扶手，壁面也出現搖晃情形	有	無	—	扶手由壁面鬆脫、跌倒導致的傷害
		固定處附近壁面出現裂痕	有	無	—	
		固定處附近壁面出現粉末	有	無	—	
③	握把	使用時鬆手突然掉落	有	無	—	身體碰撞到扶手，跌倒導致的傷害
		握把突然向上彈起	有	無	—	
		水平狀態下無法鎖定 (限上昇活動扶手(鎖定式))	有	無	—	
④	操作把手	操作把手無法操作	有	無	—	身體碰撞到扶手，跌倒導致的傷害

疑似故障時


警告



禁止拆解

禁止拆解・改造(安裝衛生紙架或遙控器等)

可能因扶手損壞、脫落，導致跌倒受傷。

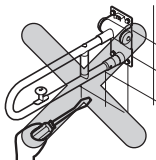

- 出現以下情形時，並非故障。委託修理之前，請確認以下事項，若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250。詳細內容請參閱售後服務(P.12)。

委託修理前

現象	建議檢查之處	處置方法	參照頁數
左右活動扶手握把無法移動。	操作把手是否在解除的位置？	將操作把手置於解除的位置。	第 8 頁
左右活動扶手握把無法固定。	操作把手是否在固定的位置？	將操作把手置於固定的位置。	第 8 頁
左右活動扶手握把操作力感覺沉重	是否安裝了附屬衛生紙架以外的商品(遙控器等)？	取下其他的商品。	—
上昇活動扶手啪噠一聲掉落	是否安裝了附屬衛生紙架以外的商品(遙控器等)？	取下其他的商品。	—
上昇活動扶手突然彈起	是否拆下附屬的零件(衛生紙架等)？	安裝附屬的零件。	—
上昇活動扶手(鎖定式)的握把無法移動	操作把手是否在解除的位置？	將操作把手置於解除的位置。	第 7 頁

售後服務

【委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.11)!!】

保證書 (另附)

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店名)及蓋章。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請參考保證書。

關於保證

●保固期中

依據保證書的規定進行維修。因為保證期間內也可能會有產生費用的項目，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。

●保固期過後

經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」(下記內容)。

關於零件的更換

免費維修所更換的零件・商品為台灣TOTO所有。

委託維修時

【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

【需要聯繫的內容】

- ①住址、姓名、電話號碼 ②商品名 ③型號 ④安裝日
- ⑤故障內容、異常情形 ⑥希望到府維修日期

【不明白之處及維修相關洽詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

維修費用的構成明細 <委託TOTO維修的場合>

根據修理可以維持商品功能的情況下，由所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **交通費**

但補修用性能零件的零件備品年限已過商品，可能有無法修理的情形。

MEMO

MEMO