


## 前方扶手(上掀活動式) 可動式扶手

型號	EWC720型 EWC730型・EWC731型
----	----------------------------

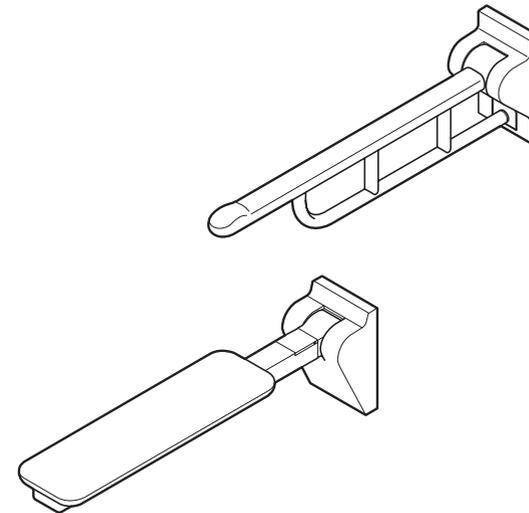

- ◆感謝您選購TOTO可動式扶手、前方扶手(上掀活動式)。請詳細閱讀本使用說明書後，正確地使用。
- ◆請務必確認保證書內已記入安裝店名、安裝日等事項。
- ◆本說明書，請務必妥善保存。必要時請詳細閱讀。

### 前言

安全注意事項	1
使用注意事項	4
各部位名稱	4

### 使用方法

使用方法	5
------	---

### 清潔保養

日常清潔保養	6
定期檢查	7

### 疑難排解

疑似故障時	8
售後服務	9

保證書	10
-----	----

# 安全注意事項 (為了安全起見 請務必遵守)

使用前，請務必詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確的使用。

- 閱畢之後，請務必收存於使用者可以隨時取閱的地方。
- 本說明書所列出的各種警告標示，是為方便您能安全、正確使用此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害，或因使用不當而導致財產的損失。各標示及其含意如下所示。

標示	意義
 <b>警告</b>	若無視此注意內容，錯誤的使用，可能導致人員的死亡或重傷。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止拆解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

依型號不同，圖示與實品的形狀可能略有差異。

警告	
禁止	<p>可動式扶手，請勿使用於扶手以外的用途（如垂吊、攀爬、搖晃、踢踩、吊曬衣物或棉被等）</p> <p>可能因手滑、商品由壁面脫落，導致跌倒受傷。</p> 
	<p>前方扶手(上掀活動式)請勿使用於維持坐姿以外的用途（如垂吊、攀爬、搖晃、踢踩、吊曬衣物或棉被等）</p> <p>可能因手滑、商品由壁面脫落，導致跌倒受傷。</p> 

## TOTO® 保證書

本保證書證明本產品為台灣地區的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。依以下記載之〈免費維修規定〉提供維修

從購買日期起算之保證期間內，若發生故障，請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧客	姓名	先生 女士	
	地址		
購買日期	年	月	日
販售店名	TEL	印	
產品名稱	前方扶手(上掀活動式) 可動式扶手		
產品型號	EWC720型 EWC730型 EWC731型		
保證期間	購買日起1年內		

### ★ 致顧客

當您領取本保證書時，請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。

本保證書不會再發出，請妥善保存(未蓋店章時，視同無效)。

### 〈免費維修規定〉

※為保障您的權益，請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期，恕難提供免費維修服務。

1. 依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時，於保證期間內免費維修。
2. 於保證期間內，請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時，請出示本保證書。
3. 因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時，為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞，請事先與購買的安裝公司或販售店商談，搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4. 保證期間內若有下列情形，仍須收取維修費用：
  - (1) 未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用，或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
  - (2) 因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
  - (3) 火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
  - (4) 因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
  - (5) 因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
  - (6) 清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
  - (7) 未出示此保證書時。
5. 本保證書僅限台灣國內有效。
6. 本保證書將不再發出，請務必妥善保存。
7. 本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修，保證期間過後的維修若有不明白之處，請向購買的安裝公司或販售店詢問。
8. 免費維修所更換之零件、商品，歸台灣東陶所有，將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線

0800-890250

台灣東陶股份有限公司

台北市松仁路101號3樓(c) TEL:(02)8789-0250

# 售後服務

【委託維修前，請先確認「疑似故障時」(P.8)！】

## 保證書 (本說明書P.10為保證書)

- 本商品依據保證書內容做出保證。請確認是否填入安裝日、安裝公司名(或販售店)及捺印。另外，請詳細閱讀保證書內容後，妥善保存。
- 保證期間請確認保證書。

## 關於保固

- 保固期中  
依據保證書的規定進行維修。因為保固期間內也可能必須付費維修，請詳細確認保證書內容。例如：「未遵照使用說明書、施工說明書、產品上的注意標籤等產生的不良問題」等情形時，需收取費用。
- 保固期過後  
經維修後可繼續使用的商品，將根據顧客要求進行維修並收取費用。  
→請確認「委託修理時」「維修費用的構成明細」(下記內容)。

## 關於零件的更換

免費維修所更換的零件・商品為台灣TOTO所有。

## 委託維修時

### 【委託修理單位】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免費服務專線。  
TEL：0800-890-250

### 【需要聯繫的內容】

- ①住址、姓名、電話號碼
- ②商品名 ③型號 ④安裝日
- ⑤故障內容、異常情形
- ⑥希望到府維修日期


### 【不明白之處及維修相關諮詢】

原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免費服務專線。TEL：0800-890-250

## 維修費用的構成明細 <委託TOTO維修の場合>

根據修理可以維持商品功能的情況下，依所要求的修理狀況付費。

標準修理費用由 **技術費** + **零件費** + **交通費** 所構成。  
但補修用性能零件的零件備品年限已過商品，可能有無法修理的情形。

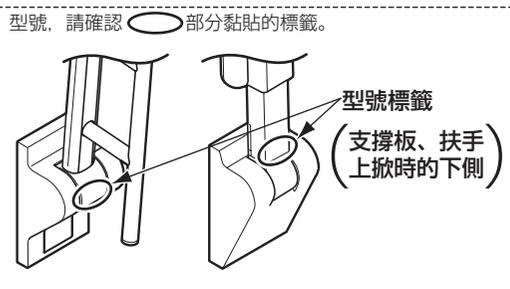

## 警告

禁止	<p><b>操作扶手或支撐板時，請勿將手放置於可動部</b></p> <p>手可能被可動部夾到，導致跌倒受傷。</p>	<p>可動部</p>
	<p><b>扶手或支撐板上掀時，請勿做為扶手使用</b></p> <p>可能因扶手或支撐板在可動狀態下，導致跌倒受傷。</p>	
	<p><b>請勿對扶手或支撐板前端及後端施加重力</b></p> <p>可能因手滑，導致跌倒受傷。</p>	
	<p><b>請勿用水潑洗商品</b></p> <p>可能斷裂W、鬆脫，導致人員跌倒受傷。</p>	
	<p><b>請勿碰撞到硬物</b></p> <p>可能因扶手或支撐板破損、脫落，導致跌倒受傷。</p>	
	<p><b>禁止拆解・改造(安裝衛生紙架或遙控器等)</b></p> <p>可能因扶手或支撐板破損、脫落，導致跌倒受傷。</p>	
務必執行	<p><b>手濕或手沾上肥皂使用扶手或支撐板時，或扶手、支撐板被潑濕或沾上肥皂時，請小心使用</b></p> <p>可能因手滑，導致跌倒受傷。</p>	

## 警告


需要照護人員的使用者，請照護人員為避免發生意外，注意使用

可能因使用者無法緊握扶手或支撐板或沒有抓好，導致相關重大事故發生。




請勿將頭或脖子等身體部位，置於扶手或支撐板與其他器具之間，並注意使用。

可能因身體被夾住，導致受傷。

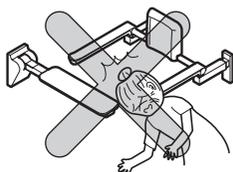

操作扶手或支撐板時，請確認可動範圍內沒有任何障礙物

可能因身體碰撞到扶手或支撐板，導致跌倒受傷。

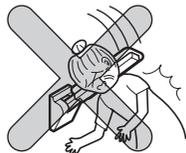

務必執行

使用扶手或支撐板時，請慢慢地操作

可能因身體碰撞到扶手或支撐板，導致跌倒受傷。



使用方法標籤，請黏貼於使用者容易看見的場所

可能因錯誤使用等導致跌倒受傷。



請定期(至少1次/月)確認是否有破損、鬆脫等異常，若有異常情形時，請停止使用，並儘快委託維修

可能因扶手或支撐板破損或脫落，導致跌倒受傷。



## 疑似故障時


### 警告



禁止拆解

禁止拆解·改造(安裝衛生紙架或遙控器等)

可能因扶手或支撐板損壞、脫落，導致人員跌倒受傷。

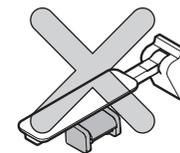


- 出現以下情形時，並非故障。委託修理之前，請確認以下事項，若仍無法解決時，請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250。詳細內容請參閱售後服務(P.9)。

### 委託修理前

現象	建議檢查之處	處置方法
扶手或支撐板 啪噹掉下	扶手、支撐板上是否安裝上其他商品(遙控器等)。	將其他商品拆下。

# 定期檢查 (至少1回/月進行檢查)

因商品長期使用所伴隨的老化(經年老化), 可能出現安全上的疑慮。  
 為了防止因經年老化產生的重大事故, 並可讓產品更長久、安全、舒適的使用,  
 請1次/月進行以下檢查事項。  
 若發生不良情形時, 請洽詢原購買的販售店、安裝公司、或台灣TOTO免付費  
 服務專線。TEL: 0800-890-250。

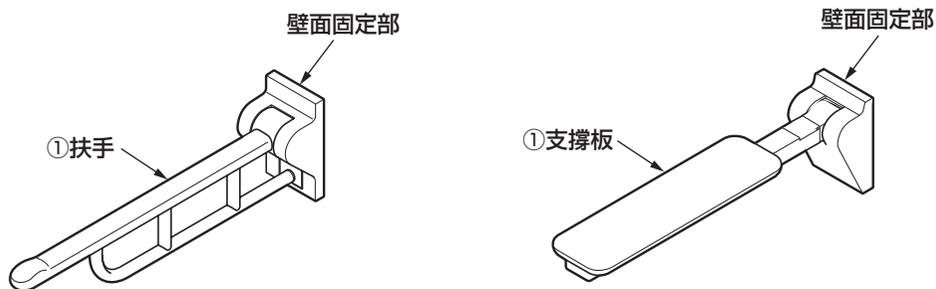


檢查部位 (參照圖示)	老化確認項目	有無徵兆	隨著經年累月的惡化可預測 的具體情形(危害情報)
① 扶手・支撐板	扶手、支撐板破裂	有 無 -	碰到內部金屬零件受傷
	可動狀態下, 鬆手後, 立刻掉下	有 無 -	扶手、支撐板碰撞到身體, 導致跌倒受傷
	搖動後有鬆動不穩的情形	有 無 -	商品由壁面鬆脫, 導致跌倒 受傷
- 壁面	搖動扶手、支撐板, 壁面也一起晃動	有 無 -	商品由壁面鬆脫, 導致跌倒 受傷
	固定部附近壁面出現裂痕	有 無 -	
	固定部週邊壁面出現粉末狀物	有 無 -	

# 使用注意事項 (請務必遵守以下事項)


請勿靠近香菸等火源

可能會導致商品(樹脂部分)燒焦、溶解。

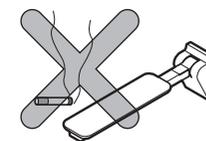


# 各部位名稱

(可動式扶手)

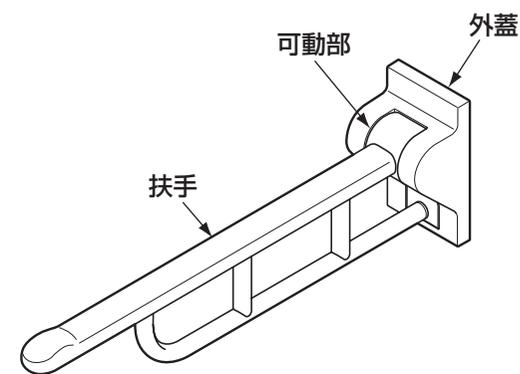

(前方扶手 (上掀活動式))

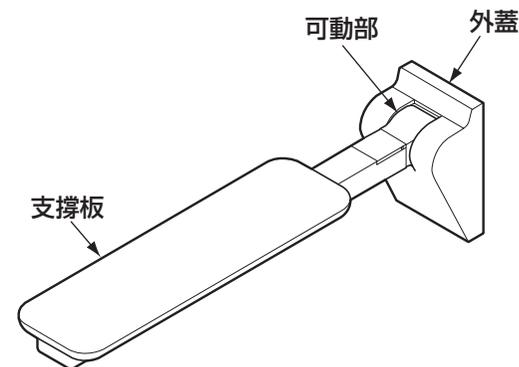


# 使用方法

## 1. 扶手或支撐板上掀。

握住扶手或支撐板，慢慢向上拿起。

## 2. 扶手或支撐板放下。

將扶手或支撐板確實向下放置在最低的位置。

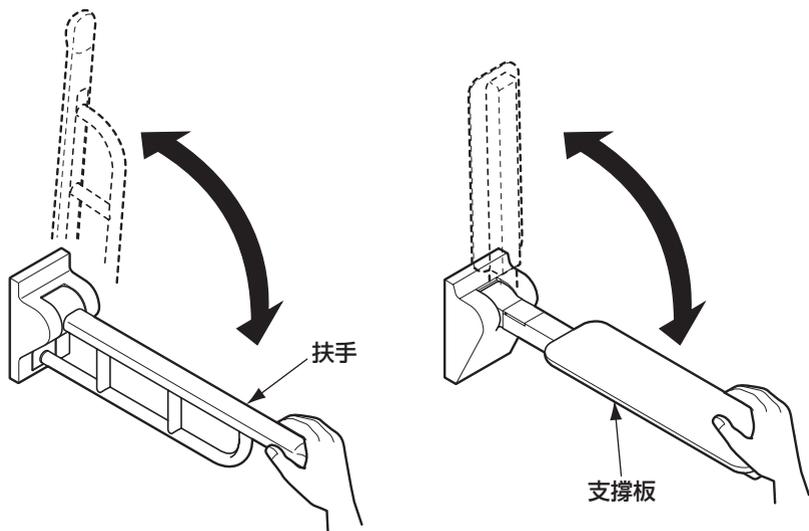

# 日常清潔保養

為充份發揮產品功能及保持美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。

## 使用布料的清潔保養

### ● 一般清潔保養方法

請以沾水或溫水後擰乾的柔軟布料，擦去髒污。

### ● 嚴重髒污時的清潔保養方法

請以柔軟布料沾取適量稀釋過的中性清潔劑擦拭後，再以沾水擰乾軟布，將清潔劑擦拭乾淨後，擦乾。



## 請求

請勿使用會損傷可動式扶手及前方扶手(上掀活動式)表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑  
可能導致商品表面變色(含生鏽)、破損。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等  
可能損傷商品表面。
- 軟膏類藥物、生髮劑、染髮劑、卸妝油、美髮造型產品等
- 稀釋劑、揮發劑、油類等有機溶劑  
可能導致商品表面變色，橡膠或樹脂零件破損。

- 若酸性·鹼性清潔劑、含氯漂白劑、有機溶劑沾到商品時，請立即使用擰乾水分的濕軟布擦拭乾淨。
- 請勿以水沖洗商品。

