

## TOTO

## 照護床

EWC500RR


為使商品機能充分發揮，請遵照本說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。


1-1

## 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確安裝。


- 為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。
- 以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

標示	意義
 <b>警告</b>	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

 <b>務必執行的「強制」內容。</b> 左圖為「務必執行」。
---


### 警告

#### 安裝前的準備


 <b>務必執行</b>	若地板設置防水層，請注意，請避免膨脹螺絲破壞防水層可能造成漏水。
	請注意，商品搬運中請勿將折疊的部分打開 可能因跌倒造成受傷。
	照護床長邊與牆壁(含門)的空隙在50mm以上100mm以下但與門等的空隙超過100mm以上時，在牆壁、門上貼上空隙注意標籤 可能因為身體夾在空隙之間，造成受傷。

### 警告

#### 安裝前的準備事項

 <b>務必執行</b>	膨脹螺絲周遭100mm以內的混凝土牆不能有開口或有凹陷 可能因商品而跌倒受傷。
	膨脹螺絲長度請選擇可確實固定在混凝土層的長度 若固定在灰漿層等沒有強度的部分，可能因強度不足，導致因商品而跌倒受傷。

#### 有關安裝

 <b>務必執行</b>	膨脹螺絲請確實地打入地面固定 (請使用混凝土電鑽徑 $\phi$ 10.5mm開預留孔) 若固定不確實，可能因商品而跌倒受傷。
	請在膨脹螺絲最下面與預留孔的底部預留縫隙 若未遵守，膨脹螺絲未被正確打入，可能因商品而跌倒受傷。
	請確實固定螺帽(雙螺帽固定) 若螺帽未確實鎖緊，會導致使用中商品搖晃不穩，造成受傷。

1-2

**警告**

有關安裝




務必執行

確認商品確實固定在地面  
另外，商品後面必須靠壁面安裝  
否則，可能因商品而跌倒受傷。

使用說明書、日常點檢表、掉落警告標示、標示標籤、空隙注意標籤，請務必轉交給客戶


使用說明書、日常點檢表、掉落警告標示、空隙注意標籤等，為確保使用者的安全，上面記載了重要的注意事項。請務必轉交給客戶。

2-1

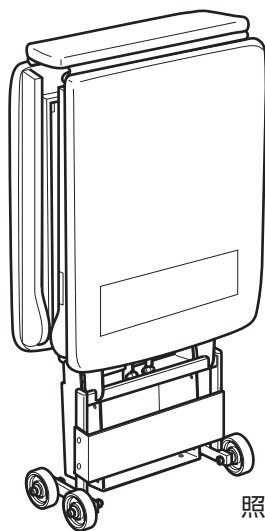**商品的確認****包裝內容物**

照護床本體

2-2

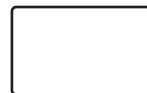



掉落警告標示




標示標籤




空隙注意標籤

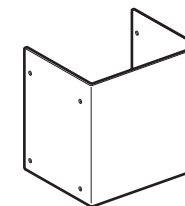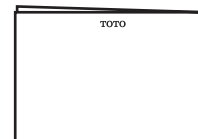地板固定箱  
外罩

施工說明書

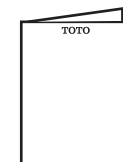

使用說明書

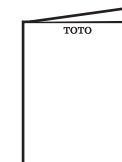

日常點檢表



M10 膨脹螺絲

4個

M8 六角螺栓  
(地板固定箱調整高度用)

4個




M10 鎖固螺帽

4個



M10 螺帽

4個

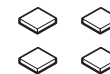

磁磚保護墊 (SUS製)

4個



M8 高螺帽

4個

M4 螺栓  
(地板固定箱外罩固定用)

8個


※請另外準備六角扳手(口徑2.5)。

# 3

## 商品安裝位置與尺寸

請依下圖所示將商品暫時放置，並確認不會碰到其他器具，及照護床是否可開闔。

(單位；mm)

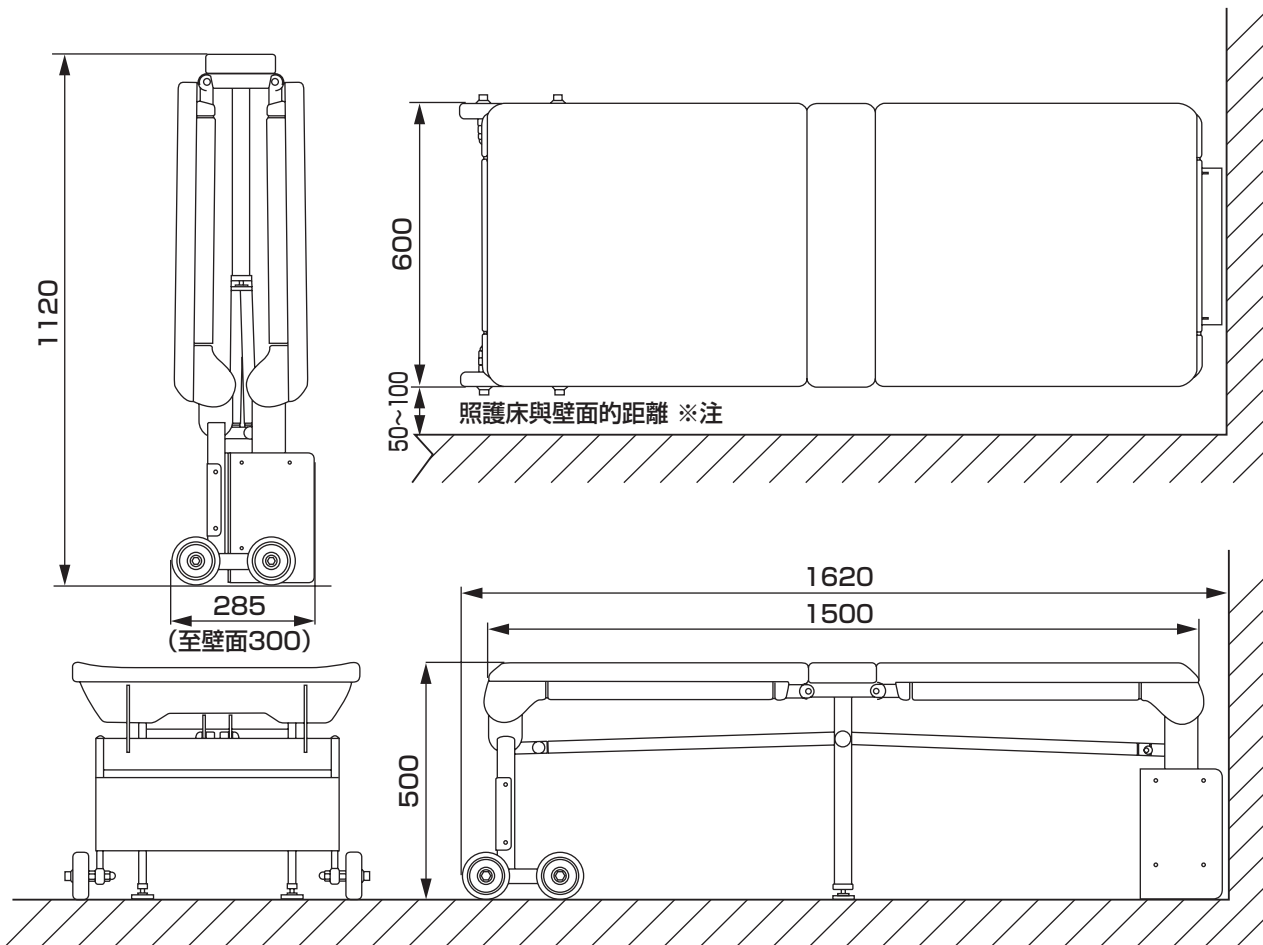

### ◆標籤黏貼位置◆



### ⚠ 警告



務必執行

照護床長邊與牆壁(含門)的空隙在50mm以上100mm以下，但與門等的空隙超過100mm以上時，在牆壁、門貼上空隙注意標籤

可能因為身體夾在縫隙之間，造成受傷。

# 4

## 膨脹螺絲的固定

### 警告

膨脹螺絲周遭100mm以內的混凝土牆不可有開口或有凹陷  
可能因商品而跌倒受傷。

膨脹螺絲長度請選擇可確實固定在混凝土層的長度

若固定在灰漿層等沒有強度的部分，可能因強度不足，可能因商品而跌倒受傷。




務必執行

膨脹螺絲請確實打入地面固定  
(請使用混凝土電鑽徑 $\phi 10.5\text{mm}$ 開預留孔)


若固定不確實，可能因商品而跌倒受傷。

確認商品確實固定在地面  
另外，商品後面請靠壁面安裝  
可能因商品而跌倒受傷。

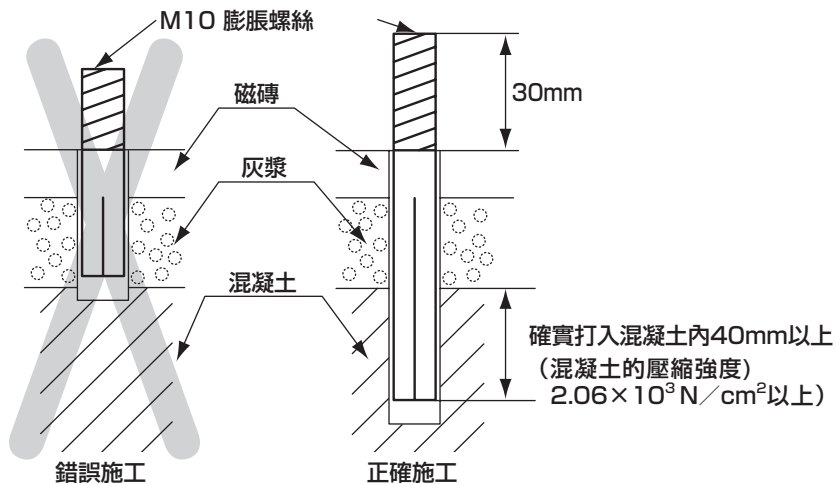


※包裝內的膨脹螺絲無法打入40mm以上時，請使用市售的膨脹螺絲M10 (螺絲、SUS製)。

- ① 標出膨脹螺絲的位置(4處)。
- ② 暫放商品，確認是否會碰撞到壁面或其他器具。

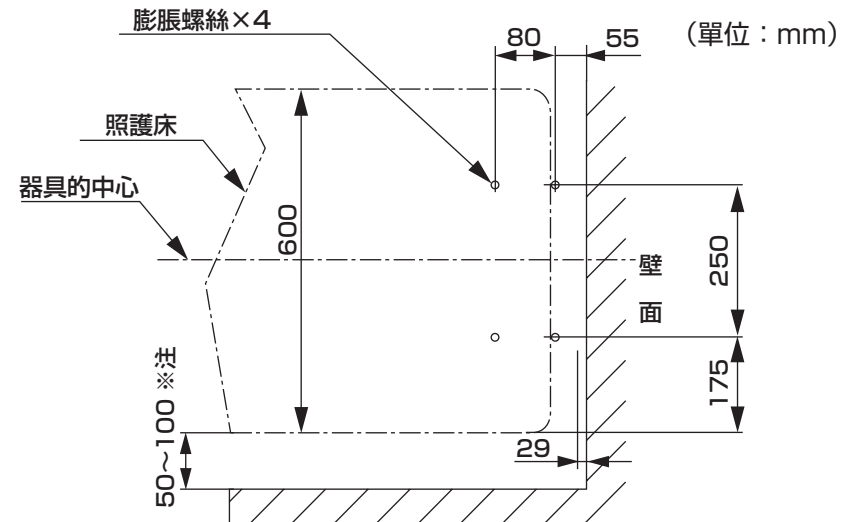

- ③ 將膨脹螺絲打入標示的位置。

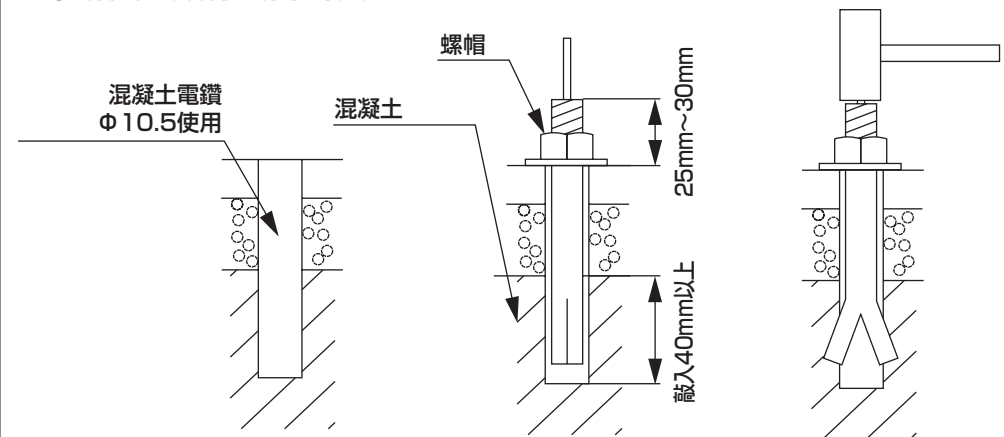

- (1) 開預留孔，並清除內部異物
- (2) 將螺帽移到螺絲最底部
- (3) 敲入膨脹螺絲

# 5-1

## 本體的安裝


### 警告




務必執行

請注意，搬運中請勿將折疊的部分打開  
可能因跌倒造成受傷。


①為保護地面，在膨脹螺絲外側旁鋪上磁磚保護墊。

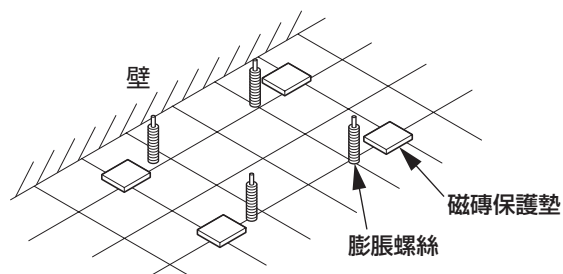


②安裝箱由膨脹螺絲上方安裝。

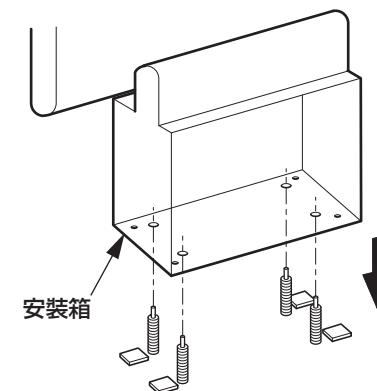

③為了讓照護床的腳輪(4支)著地，將預先鎖入M8高螺帽的M8六角螺栓(4支)安裝在安裝箱上調整照護床的高度。此時為使M8六角螺栓對準磁磚保護板，請移動磁磚保護板位置。

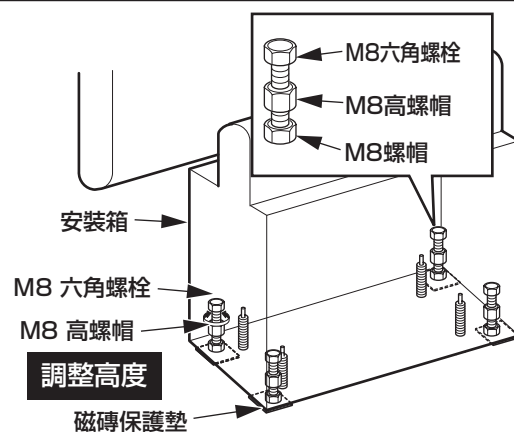


④若以平整地面的基準高度，由地面至安裝箱底面為6.5mm。鎖入M8六角螺栓，固定箱往上，鬆開則往下。決定高度後，請使用事先鎖的M8高螺帽固定。

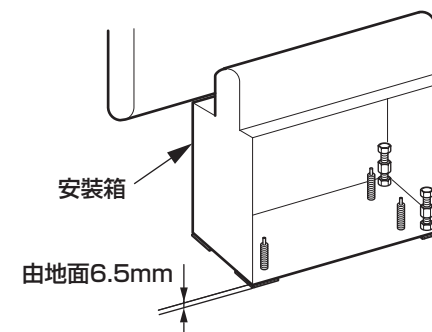



# 5-2

⑤若地面不平整，可能導致輪腳無法貼地，安裝完畢後，請試坐照護床，若輪腳能著地，實際使用上是沒有問題的。

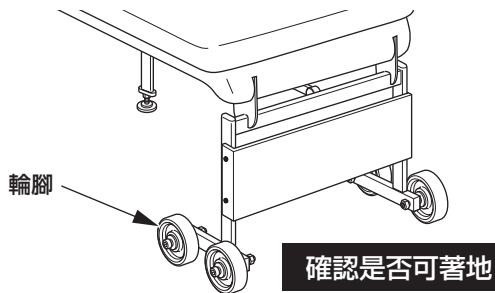

⑥地面與照護床若呈水平，請確實固定膨脹螺絲的螺帽。請在4處的膨脹螺絲追加M10鎖固螺帽、M10螺帽鎖緊。(雙螺帽要領)

- 1)鎖緊第一個鬆動的鎖固螺帽。
- 2)再由上方鎖入第2個螺帽。
- 3)使用扳手固定第2個螺帽，相反方向鎖緊第一個螺帽。

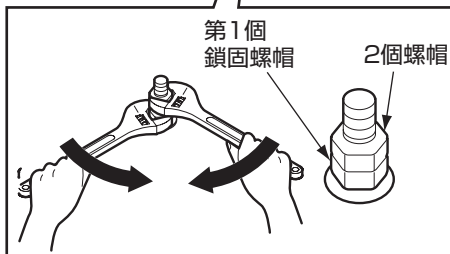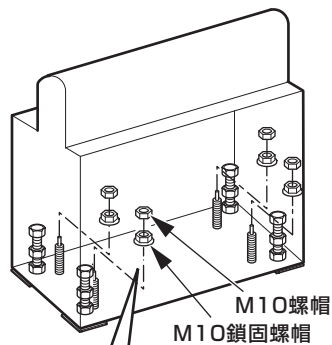

## 警告

**螺帽確實固定(雙螺帽固定)**


若螺帽沒有鎖緊，可能導致使用中的商品鬆脫搖晃，造成受傷

務必執行

# 6

## 安裝箱外罩的安裝

使用包裝內的M4螺栓(8個)，將安裝箱外罩安裝在安裝箱上。請使用六角扳手(口徑2.5)

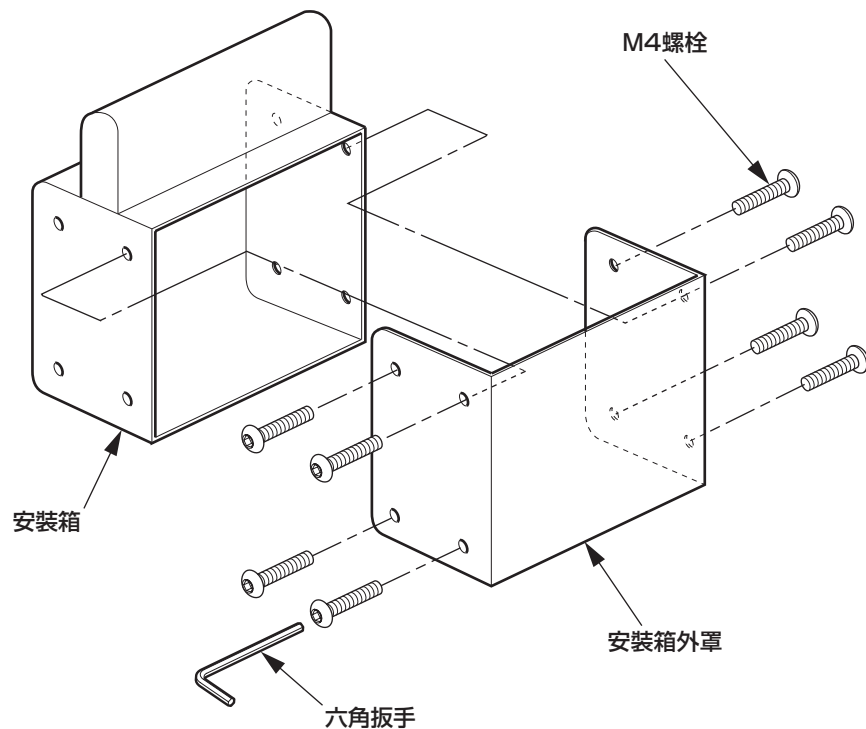

以手鎖緊




禁止使用電鑽。  
請使用手鎖緊。


# 7-1

## 照護床的水平調整


① 展開照護床。  
鬆開中央腳的螺帽。

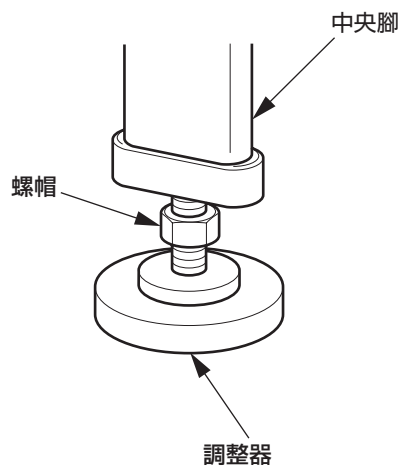


② 將照護床中央向下壓時，為了讓照護床保持水平，請轉動調整器調整高度。

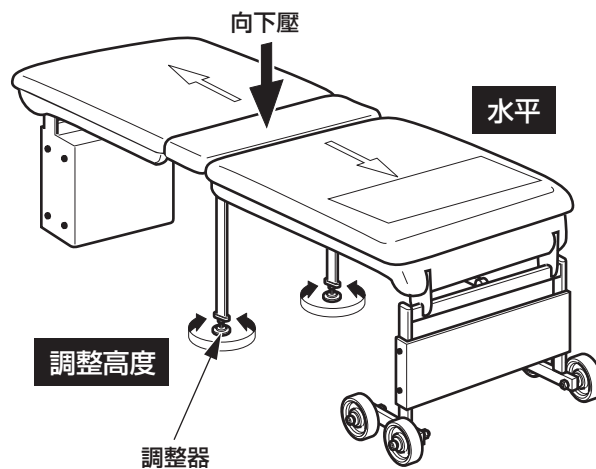

③ 鎖緊螺帽固定。

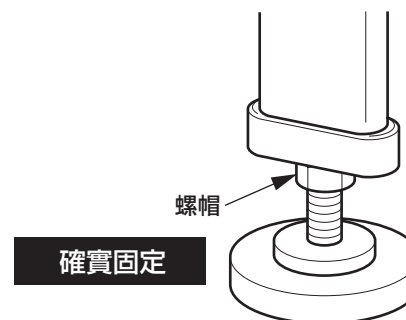


④ 請開關操作數次，確認沒有異常。

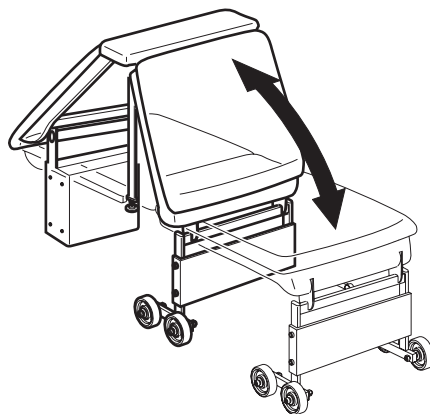


## 7-2

⑤ 照護床上沒有人使用時，因為彈簧的影響下減輕了操作力，中央腳的調整器雖然會浮起懸空，但實際使用上是沒有問題的。

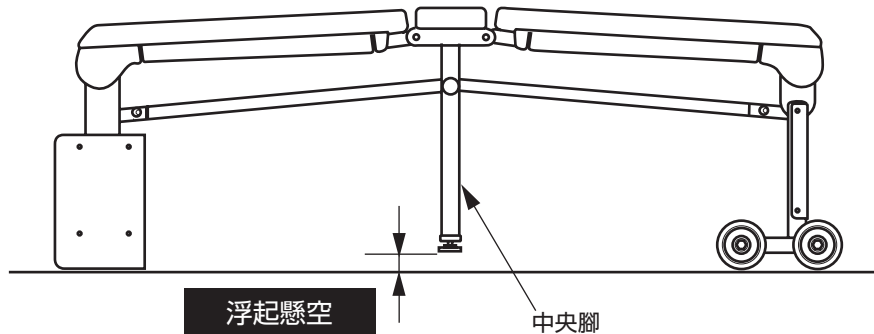

⑥ 請撕下照護床、內蓋外蓋的防傷紙。

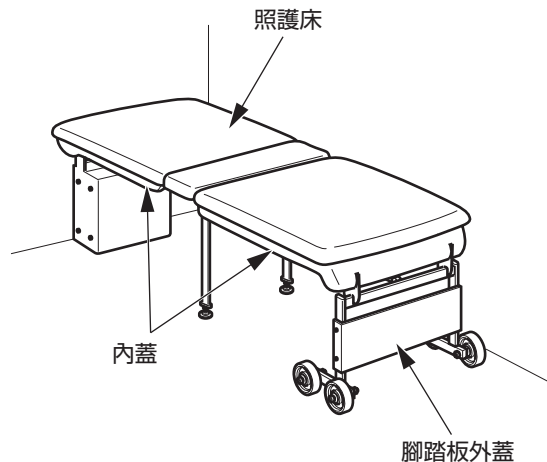

## 8

### 施工後的點檢

施工後，請進行以下檢查項目。  
若出現異常時，請重新進行施工。

1. 商品是否沒有鬆脫搖晃情形、是否確實固定好？

鬆脫搖晃情形請參照 **5-2**。

2. 中央腳是否 2 支都確實接觸地面？

若中央腳沒有碰觸到地面，請參照 **7-1** 調整。

## 9

### 請求

請將放入使用說明書、日常點檢表、掉落警告標示、標示標籤、空隙注意標籤等標籤的袋子交給客戶。

#### 警告

請將使用說明書、日常點檢表、掉落警告標示、標示標籤、空隙注意標籤交給客戶。



務必執行

使用說明書、日常點檢表、掉落警告標示、空隙注意標籤上記載了為確保使用者的安全重要注意事項。請務必轉交給客戶。