

TOTO

照護床

EWC500型

為使商品機能充分發揮，請遵照本說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

1-1. 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確安裝。

- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。
- 以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 務必執行的「強制」內容。左圖為「務必執行」。	

 警告	
安裝前的準備事項	
 務必執行	為避免膨脹螺絲破壞防水層導致漏水，請開孔後清除孔內異物，填入矽利康再敲入膨脹螺絲，最後在孔周圍塗抹矽利康
	否則，可能造成漏水。
	請注意，搬運過程中請勿將折疊的部分打開 否則，可能因跌倒，造成受傷。
	照護床長邊與牆壁(含門)的空隙須在50mm以上、100mm以下。但，與門等的空隙超過100mm以上時，在牆壁或門上張貼間隙注意標籤 否則，可能因為身體夾在縫隙之間，造成受傷。

 警告	
安裝前的準備事項	
 務必執行	膨脹螺絲周圍100mm的範圍內，混凝土沒有出現開口或缺口 否則，可能造成商品倒下，導致受傷。
	請選擇可確實固定在混凝土層的膨脹螺絲長度 若固定在灰漿層等沒有強度的部分，可能因強度不足造成商品倒下，導致受傷。
關於安裝	
 務必執行	請確實地將膨脹螺絲打入地面固定 (請使用混凝土電鑽徑φ10.5mm開預留孔) 若固定不確實，可能造成商品倒下，導致受傷。
	請在膨脹螺絲最下面與預留孔的底部，預留縫隙 若未遵守，膨脹螺絲將無法正確打入，可能造成商品倒下，導致受傷。
	請確實固定螺帽(以雙螺帽方式固定) 若未確實鎖緊螺帽，會造成使用中的商品搖晃不穩，導致受傷。

1-2.

警告

關於安裝



務必執行


請確認商品確實固定在地面
另外，商品後面必須靠牆壁面安裝
否則，可能造成商品倒下，導致受傷。

請將產品內的間隙注意標籤、掉落警告標籤貼在客戶容易看到的地方

間隙注意標籤、掉落警告標籤是記載，客戶在使用產品時需要注意的事項。若在不貼間隙注意標籤、掉落警告標籤的情況下使用商品，無法讓客戶注意使用產品的話，可能會誤操作而造成受傷。



2-1. 商品的確認

包裝內容物

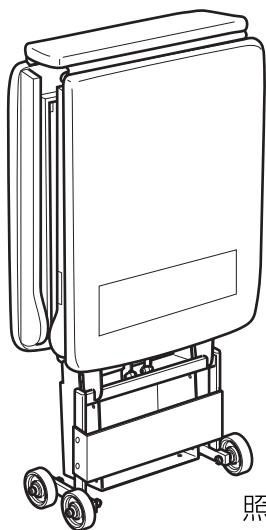

照護床本體

2-2.

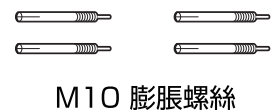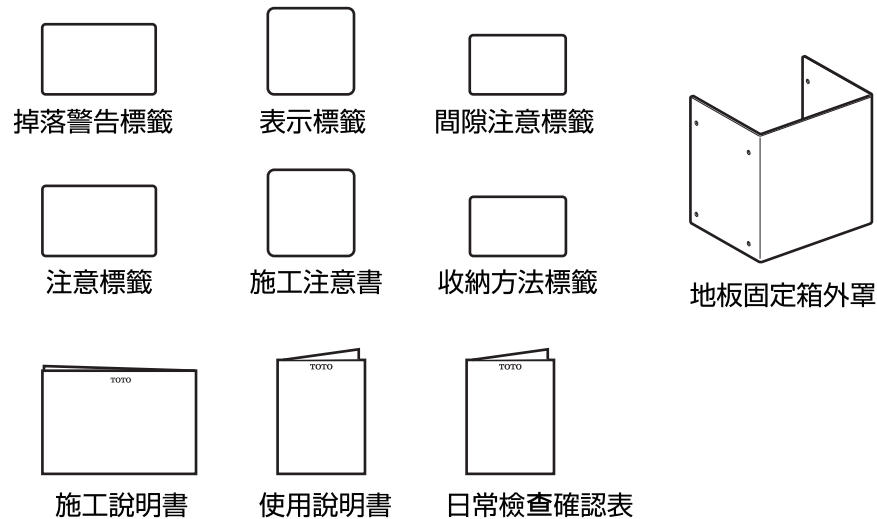

4個

M10 膨脹螺絲



4個

M8 六角螺栓
(地板固定箱調整高度用)




4個

M10 鎖固螺帽



4個

M10 螺帽

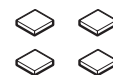

4個

磁磚保護墊(SUS製)



4個

M8 高螺帽



8個


M4 螺栓
(地板固定箱外罩固定用)

※請另外準備六角扳手(徑2.5)。

3. 商品安裝位置與尺寸

請依下圖所示將商品暫時放置，務必確認不會碰到其它器具，以及照護床是否可以開關動作。

(單位：mm)

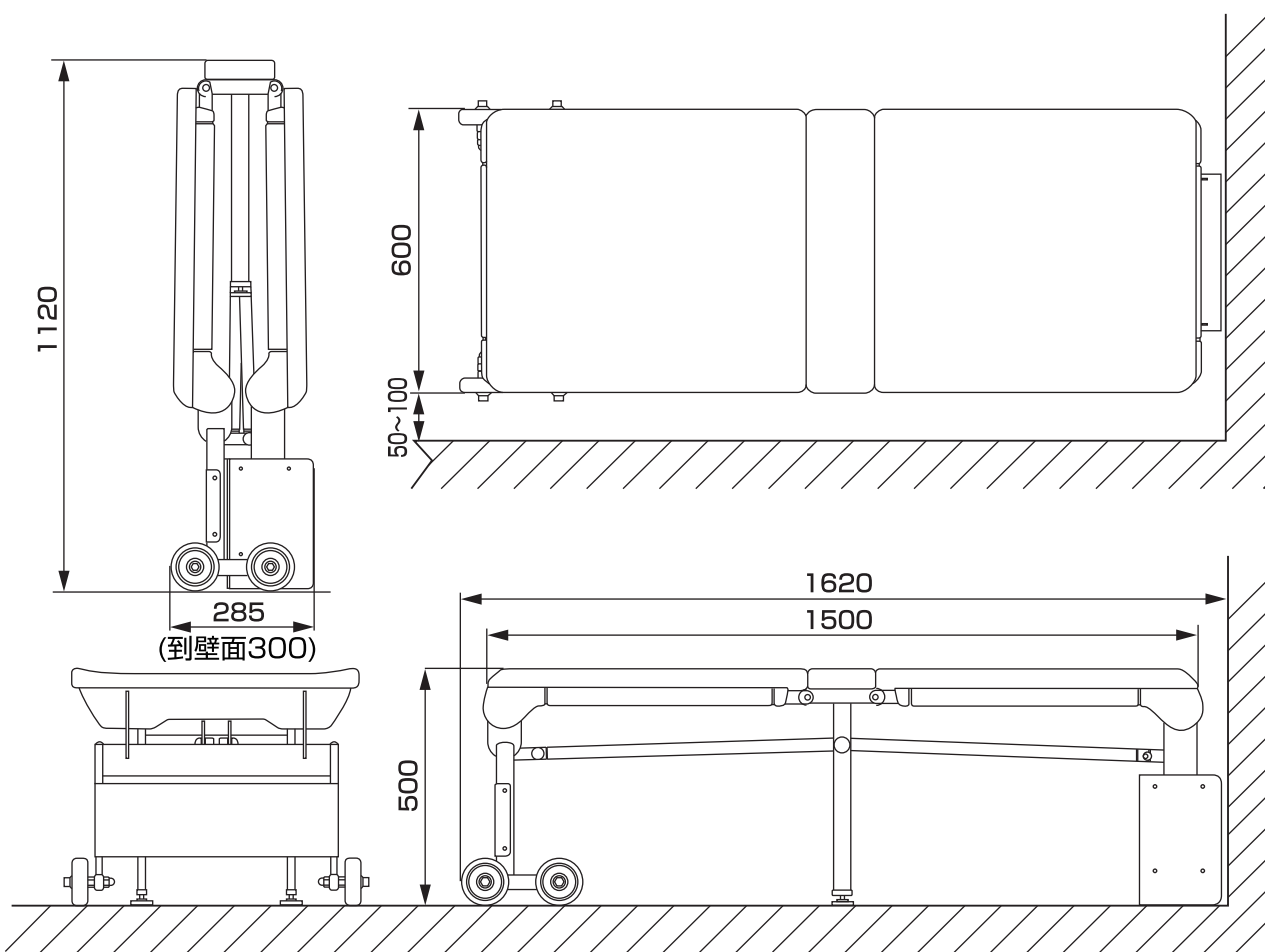

◆ 貼附標籤的位置 ◆



⚠ 警告



務必執行

照護床長邊與牆壁(含門)的空隙須在50mm以上、100mm以下。但，與門等的空隙超過100mm以上時，在牆壁或門上張貼間隙注意標籤

可能因為身體夾在縫隙之間，造成受傷。

4. 固定膨脹螺絲

警告

請確認膨脹螺絲周圍100mm的範圍內，混凝土沒有出現開口或缺口

否則，可能造成商品倒下，導致受傷。

請選擇可確實固定在混凝土層的膨脹螺絲長度

若固定在灰漿層等沒有強度的部分，可能因強度不足造成商品倒下，導致受傷。

請確實地將膨脹螺絲打入地面固定
(請使用混凝土電鑽徑 $\varnothing 10.5\text{mm}$ 開預留孔)


若固定不確實，可能造成商品倒下，導致受傷。

請確認商品確實固定在地面。另外，商品後面必須靠牆壁面安裝

否則，可能造成商品倒下，導致受傷。




務必執行

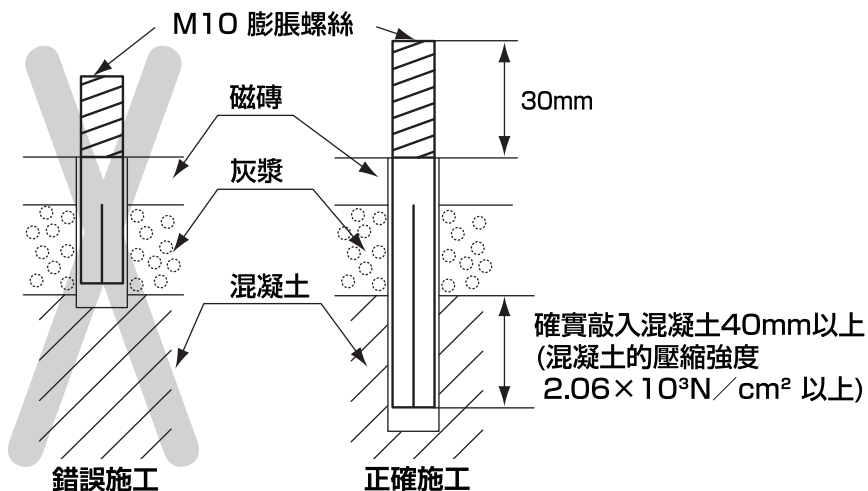


※若包裝內的膨脹螺絲無法敲入 40mm 以上時，請使用市售的膨脹螺絲 M10(螺絲、SUS製)。

① 標記膨脹螺絲的位置(4處)。

② 暫放商品時，請確認不會碰撞到其他的物品。

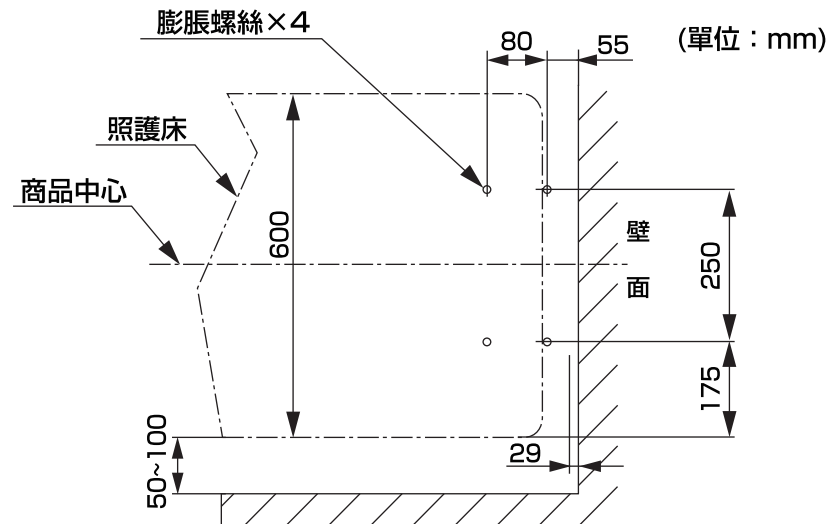

③ 將膨脹螺絲敲入標示的位置。

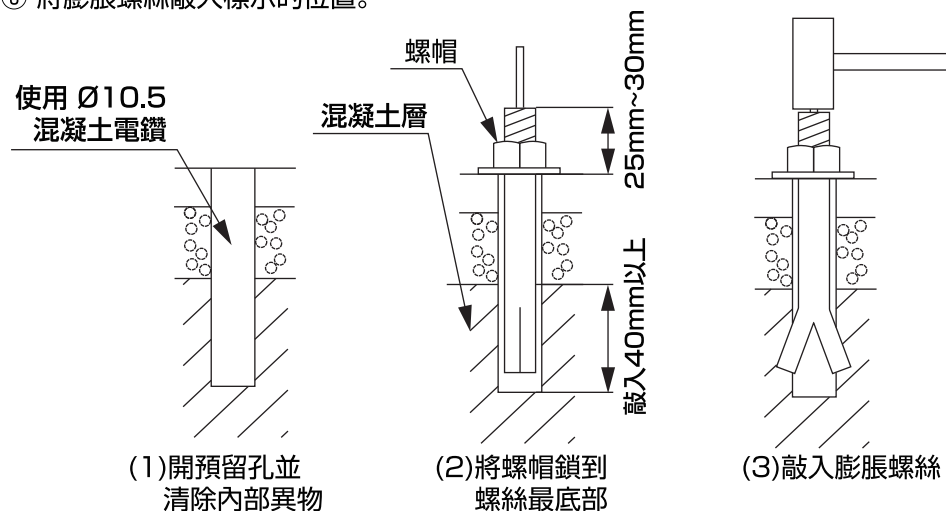

請翻背面

5-1. 安裝本體

警告




務必執行


請注意，搬運過程中請勿將折疊的部分打開

否則，可能因跌倒，造成受傷。

- ① 為保護地面，在膨脹螺絲外側旁，鋪上磁磚保護墊。

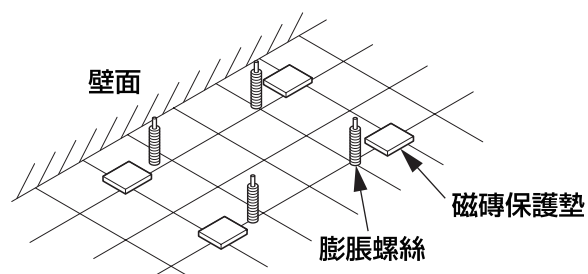


- ② 安裝箱從膨脹螺絲上方放入並安裝。

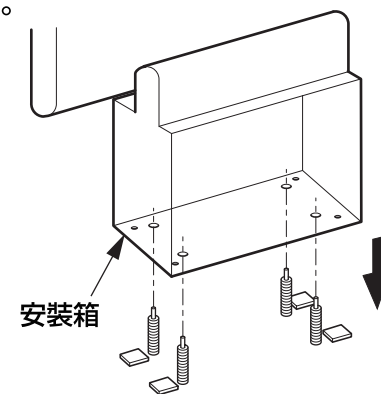


- ③ 為了讓照護床的腳輪(4個)著地，須預先鎖入 M8 高螺帽；再鎖 M8 六角螺栓(4個)來調整照護床的高度。

此時，請視情況將 M8 六角螺栓移動到磁磚保護墊的上方。

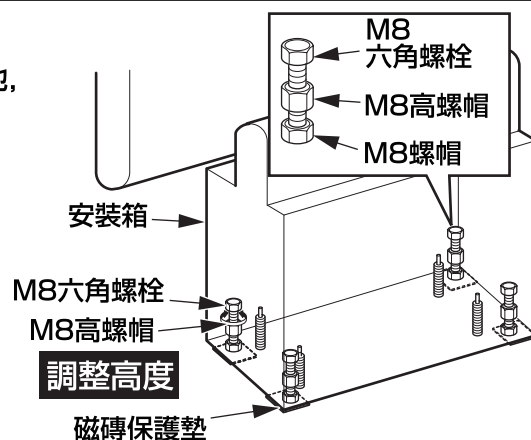


- ④ 若以平整地面為基準高度，從地面至安裝箱底面為6.5mm。鎖入M8六角螺栓後，若要固定安裝箱是將螺栓往上，鬆開則往下。決定高度後，請用預先鎖入的M8高螺帽固定。

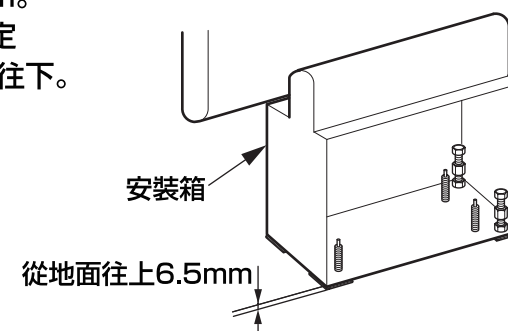

5-2.

- ⑤ 若地面不平整，可能導致腳輪無法著地。安裝完畢後，請試坐照護床；若腳輪能著地，實際使用是沒有問題的。

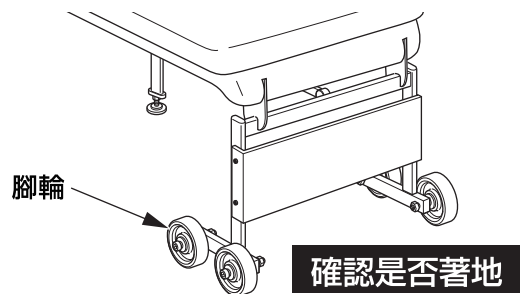


- ⑥ 當地面與照護床呈水平時，請確實固定膨脹螺絲的螺帽。

請在4處的膨脹螺絲追加鎖緊 M10 鎖固螺帽與 M10 螺帽。

※雙螺帽要領

- (1) 鎖緊第1個鬆動的鎖固螺帽。
- (2) 再由上方鎖入第2個螺帽。
- (3) 使用扳手固定第2個螺帽，相反方向用力鎖緊第1個鎖固螺帽。

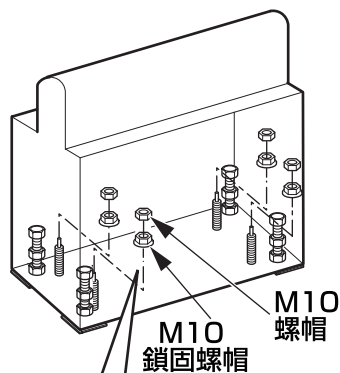


警告




務必執行

請確實固定螺帽
(以雙螺帽方式固定)
若未確實鎖緊螺帽，會
造成使用中的商品搖晃
不穩，導致受傷。

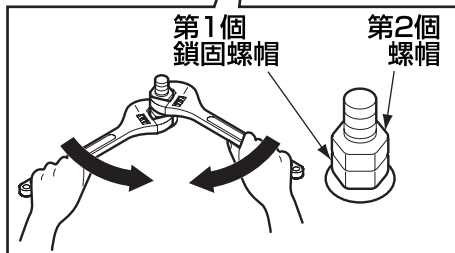

6. 安裝地板固定箱的外罩

使用包裝內的 M4 螺栓(8個)，將地板固定箱外罩裝在安裝箱上。
請使用六角扳手(口徑2.5)。

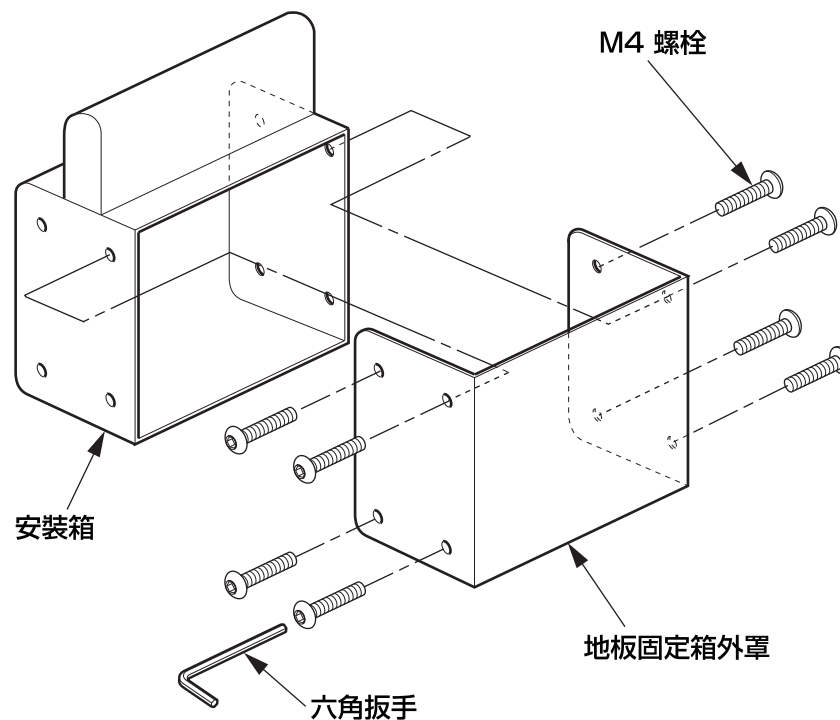


用手鎖緊




禁止使用電鑽。
請用手鎖緊。

7-1. 照護床的水平調整


- ① 打開照護床。
鬆開中央腳的固定螺帽。

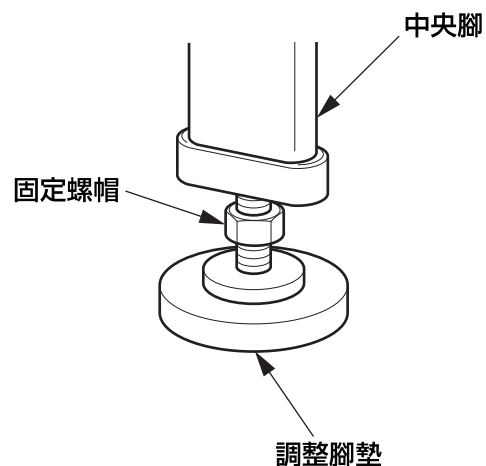


- ② 為確保照護床打開是水平狀態，下押照護床中央時，請轉動調整腳墊的高度。

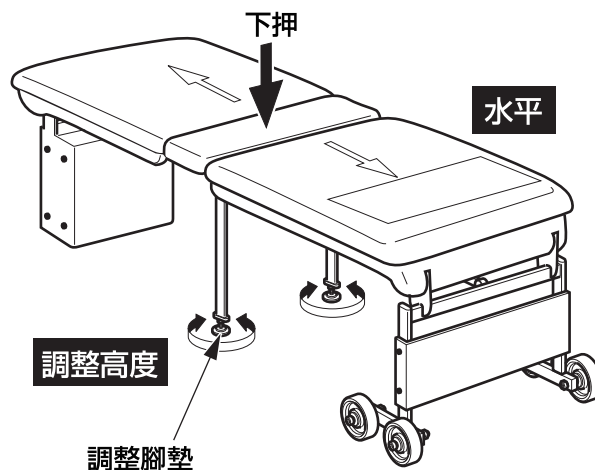

- ③ 鎖緊固定螺帽。

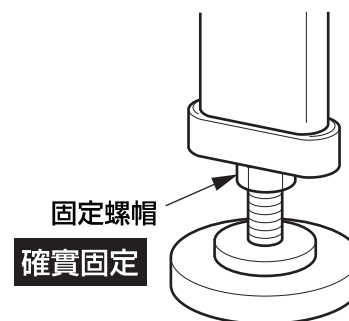


- ④ 請反覆數次進行開關動作，確認沒有異常。

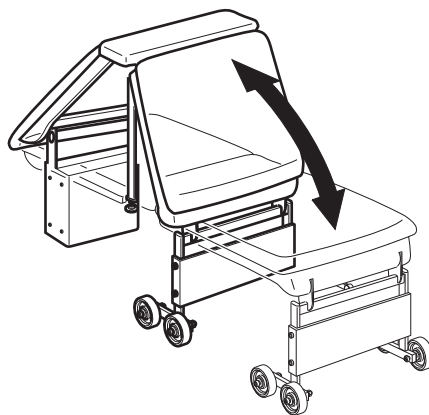


7-2.

- ⑤ 當照護床沒有人使用時，因為有彈簧的關係，所以中央腳的調整腳墊會稍微浮起懸空；但，實際使用是沒有問題的。

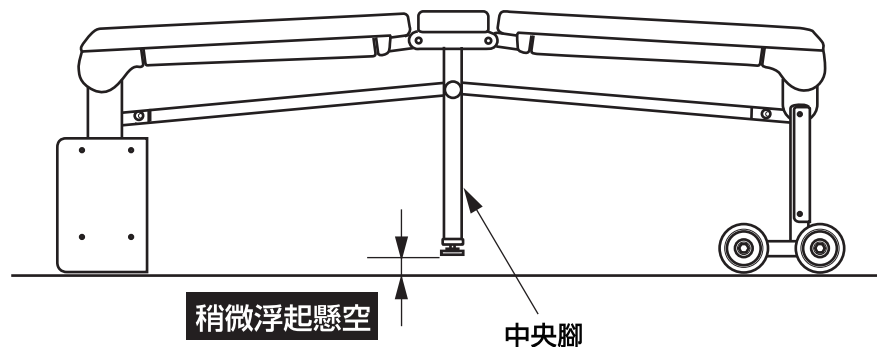


- ⑥ 請撕下照護床、內蓋、腳踏板外蓋的防傷紙。

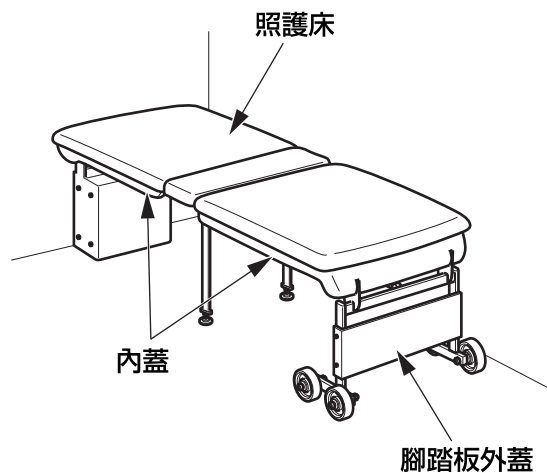

8. 貼附標籤

如右圖所示，請將產品內的各種標籤貼在客戶容易看到的地方。

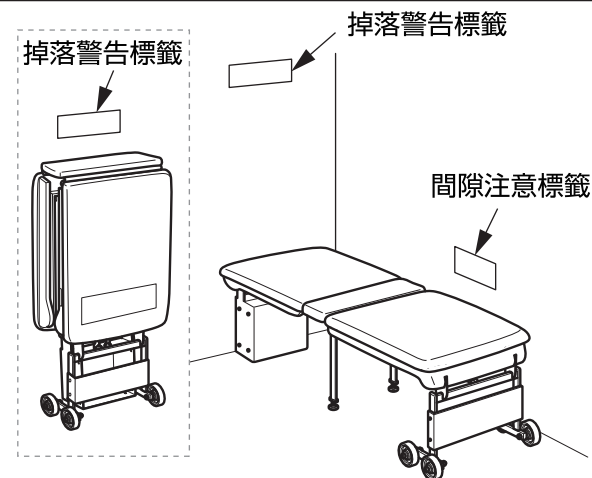

警告



務必執行

請將產品內間隙注意標籤、掉落警告標籤貼在客戶容易看到的地方

間隙注意標籤、掉落警告標籤是記載，客戶在使用產品時需要注意的事項。若在不貼間隙注意標籤、掉落警告標籤的情況下使用商品，無法讓客戶注意使用產品的話，可能會誤操作而造成受傷。

- 若在磁磚牆壁無法將標籤貼整齊時，先把標籤貼在比較硬的材質上(如將貼紙護貝)，再用雙面膠貼到牆壁，就可以整齊美觀。
- 當牆壁凹凸不平、標籤不黏時，先把標籤貼在比較硬的板材，再用螺絲將板材固定在牆壁。

9. 施工後的檢查

施工後，請檢查以下的項目。
若出現異常，請重新施工。

1. 商品是否沒有鬆動搖晃、確實鎖緊？
若有鬆動搖晃時，請參照 **5-2.**
2. 中央腳是否著地？
若中央腳未著地，請參照 **7-1. 照顧床的水平調整** 進行調整。

※請務必將產品內的使用說明書、日常檢查確認表、表示標籤轉交給客戶。